




ARDO 安朵
Your Professional Way to Care

Amaryll手动吸乳器使用说明：
在遇到哺乳问题，生病或母婴分离的情况下用于吸取母乳。

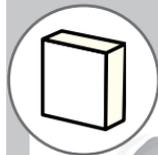


配件内容：

Amaryll手动吸乳器：a) 控制杆 b) 装置盖 c+d) 薄膜盘和薄膜连杆
e) 26mm乳罩杯 f) 唇阀 g) 150ml储奶瓶
h) 底座 i) 瓶盖 j) 瓶盖垫 k) 清洁刷
l) 31mm乳罩杯 m) 28mm乳罩杯 n) 26mm按摩软罩

Amaryll手动吸乳器简易版：a 至 j 的全部配件

Amaryll手动吸乳器豪华版：a 至 n 的全部配件

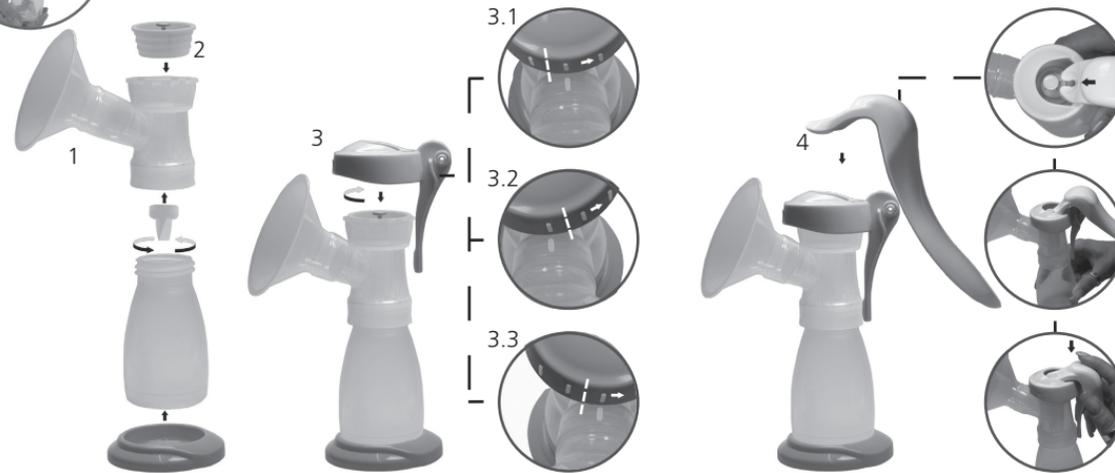

安装流程：

重要！第一次使用前要煮沸消毒（消毒时间不超过5分钟）

- 1) 按图解流程；
 - 2) 将薄膜盘置于薄膜连杆凹槽上；
 - 3) 盖上装置盖，使顶部标志线相互对齐，然后向右旋转；
- 3.1) 标准位置；
3.2) 控制杆位置偏左；
3.3) 控制杆位置偏右；
- 4) 将控制杆固定在薄膜连杆上，轻轻向下用力，使其卡在装置盖上。
- 注意：唇阀的拔下和装入请捏住厚的两边进行，不可直接撕拉薄边。



家庭清洁：每次使用后清洗，并冲洗干净。每天沸水煮沸消毒，然后用干净的布擦干，盖上。

医院清洁：图示配件在121°C高温灭菌，消毒20分钟。134°C高温灭菌，消毒5分钟。（医院消毒请严格按照规定温度和时间进行）

注意：唇阀为易损配件，不宜用清洁刷里外刷，须避免因过度清洗造成损坏。



家庭清洁：用一块布擦拭即可。图示配件不必要用沸水煮，若选择请不要超过3分钟。

医院清洁：擦拭清洁即可。图示配件不必要用高温灭菌，若选择请注意灭菌时间。




安朵母乳喂养辅助产品系列：

- 1) 安朵母乳储存在袋，可在用安朵吸乳器吸乳时直接使用，然后储存母乳。
- 2) 安朵母乳储存瓶，不含双酚A，更有超值优惠3个装。
- 3) 拥有手动吸乳器升级套装，只需几步，就可将您的安朵爱瑞手动吸乳器，转换为一个可用于安朵电动吸乳器的吸乳套装。
- 4) 超大乳房尺寸的哺乳母亲也不用担心，安朵有36mm的超大乳罩杯可供选购。




要求：
每次使用前
清洁双手

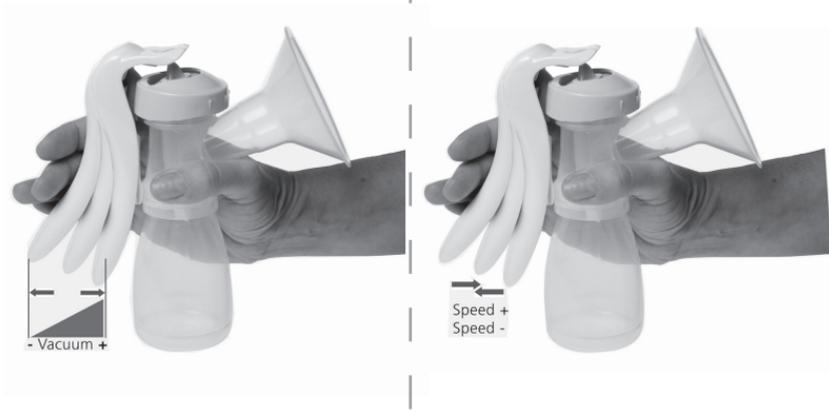

使用方法：

舒适的坐下和放松，将乳头置于乳罩杯中心放置，吸乳时以乳头不会触碰到乳罩杯壁为佳，保持乳罩杯管口向下使乳汁能顺畅流入储奶瓶中。

1. 调整吮吸力量（真空）
越大力压握杆，吮吸力度越大；向上和向下移动握杆越快，吮吸速度就越快。
2. 调整速度（循环周期）
建议在刚开始时，速度要快，吮吸力度要小，这样才能更好的刺激喷乳反射。一旦乳汁开始流出，放缓速度，增加吮吸力度。

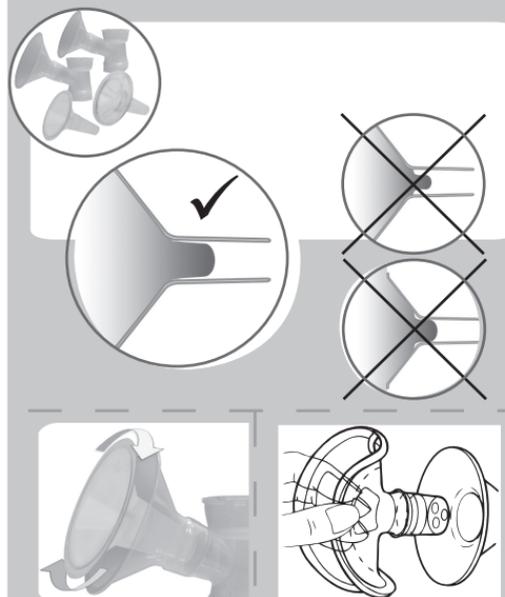

选择乳罩杯和按摩软罩：

如果您的乳头与乳罩杯末端漏斗处内壁摩擦，让您有不适感，使用大一号的乳罩杯，或内嵌一个按摩软罩。如果乳晕完全被末端漏斗处包含，使用小一号的乳罩杯。内嵌式按摩软罩只能与31mm乳罩杯配套使用。



母乳储存：

储存条件	储存时长
室温，低于25°C	6小时
冰箱冷藏室，低于4°C	5天
独立门冷冻柜，低于-18°C	3-6个月
冰箱深度冷冻柜，低于-20°C	6-12个月

母乳的解冻：温和解冻，可先放于冰箱冷藏室水盒中自然解冻，而后用热水温热母乳便可。

可能的问题与解决方法：

吸力弱，或无吸力。

- 确保爱瑞手动吸乳器安装正确，且未摔坏。
- 检查唇阀是否有裂缝，或粘连为一体。
- 检查装置盖是否完好是否旋紧密封。







吸乳时感觉不适。

- 确保乳头位于乳罩杯末端漏斗处中间。
- 检查乳罩杯大小是否适合你的乳头。如果仍感不适，请拨打4006-222-032客服热线，安朵客服将为您解答和服务。

安全规则：

仅在清洗或消毒后使用，
清洗后，请注意检查吸

乳器及其配件是否有任
何损坏。

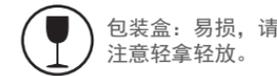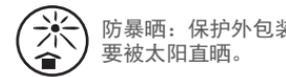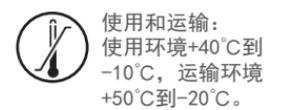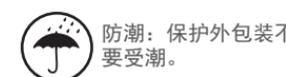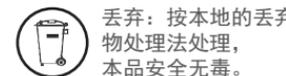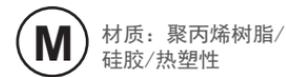

ARDO 安朵

瑞士

Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
6314 Unteraegeri
Switzerland

T +41 (0)41 754 70 70
F +41 (0)41 754 70 71
www.ardomedical.com

中国

安朵（上海）母婴护理用品有限公司
电话：+86-021-64297024
传真：+86-021-64297022

网址：www.ardo.com.cn
热线：4006-222-032